

# Samaritan® PAD 500P Trainer

Defibrylator treningowy ze zdalnym sterowaniem

## Realistyczna demonstracja w ramach szkolenia ratowniczego i niezwykła retencja szkolonych

Łatwy w obsłudze trener do defibrylacji samaritan PAD Trainer ze zdalnym sterowaniem prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, podanie energii elektrycznej i procedurę resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO), wiernie odwzorowując wygląd i działanie defibrylatora do użytku publicznego samaritan PAD 500P, bez podawania wstrząsu elektrycznego.



### Symulacja pełnego wachlarza realnych zdarzeń

Wielofunkcyjny pilot pozwala na wybór jednego z sześciu scenariuszy AHA/ERC dla celów demonstracji i szkolenia. Jeden pilot może kontrolować wiele urządzeń szkolnych jednocześnie (w zasięgu do 3-5 metrów / 10-15 stóp). Trener jest kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO.

### Realistyczny

Wskazówki głosowe i graficzne oraz polecenia RKO są identyczne z wydawanymi przez defibrylator HeartSine samaritan PAD. Identyczne są również rozmiary i kształt. Wyraźne oznakowanie i kolor membrany zapobiegają omyłkowemu użyciu trenera w sytuacji faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia.

### Odpowiedni dla wszystkich poziomów umiejętności

Trener może być używany przez pracodawców prywatnych do szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy z użyciem pomocy samaritan PAD. Ponadto odpowiada on wymaganiom zawodowych trenerów, szkolących laików nie znających nawet podstawowych zasad ratownictwa medycznego, jak i trenerów prowadzących szkolenia okresowe dla doświadczonych ratowników.

### Doskonały stosunek jakości do ceny

Trener zasilany jest z akumulatora wielokrotnego ładowania. Elektrody są niedrogie i nadają się do wielokrotnego użytku, wiernie odwzorowując wygląd kasety elektrod i baterii Pad-Pak™ używanych w defibrylatorach HeartSine samaritan PAD.



**Pełny pakiet.** Pakiet HeartSine samaritan PAD Trainer zawiera pilota z bateriami AAA, trenera Trainer-Pak, ładowarkę, miękki futerał z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny, instrukcję użytkownika, kabel przesyłu danych oraz pięć par elektrod treningowych.

### Scenariusze ratownicze

HeartSine samaritan PAD Trainer posiada wbudowane realistyczne scenariusze akcji ratunkowej do szkoleń AED, zgodne z protokołem AHA/ERC 2010 (jeden wstrząs, dwie minuty RKO). Metronom i migający wskaźnik o częstotliwości 110 uderzeń na minutę pomagają określić właściwe tempo ucisków klatki piersiowej.

Możliwe do wyboru scenariusze szkoleniowe:

- ▶ ZALECANY WSTRZĄS (SA), następnie RKO
- ▶ NIEZALECANY WSTRZĄS (NSA), następnie RKO
- ▶ SPRAWDŹ ELEKTRODY, następnie stan SA i RKO
- ▶ Uruchomienie bezpośrednio w trybie w trybie „ANALIZA”, następnie SA i RKO, SA i RKO oraz NSA i RKO.
- ▶ ZALECANY WSTRZĄS (SA), następnie RKO, 30 ucisków i 2 wdechy
- ▶ NIEZALECANY WSTRZĄS (NSA), następnie RKO, 30 ucisków i 2 wdechy



## Funkcje

**Mechanizm zwijania przewodu.** Łatwa wymiana elektrod i przewodów po każdej sesji skraca czas ponownego przygotowania systemu. ► **NOWOŚĆ**

**Akumulator wielokrotnego ładowania.** Na jednym naładowaniu działa do 7 godzin – cały dzień szkolenia. Ponowne ładowanie zajmuje tylko cztery godziny. ► **ULEPSZENIE**

**Wskaźnik stanu akumulatora.** Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane). ► **NOWOŚĆ**

**Przycisk pauzy.** Tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji.

**Regulacja głośności.** Cztery poziomy głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu. ► **ULEPSZENIE**

**Wybór scenariuszy szkoleniowych.** Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC. ► **ULEPSZENIE**

**Elektrody szkoleniowe.** W komplecie pięć par wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku. Nowe elektrody mogą pracować ze wszystkimi modelami fantomów szkoleniowych i łatwiej jest je montować we wkładce. ► **ULEPSZENIE**

**Aktualizacje.** Aktualizacje oprogramowania Trainer dostępne na stronie internetowej HeartSine.

**Wybór języka.** Dwadzieścia dziewięć języków ułatwia zrozumienie poleceń trenera w języku użytkownika.



## Dane urządzenia (TRN-300-xx)

### Parametry

- Waga: 0,6 kg (1,3 lbs)
- Akumulator: Wielokrotnego ładowania
- Zawartość zestawu: Pilot z bateriami AAA, Trainer-Pak, ładowarka, miękki futerał z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny, instrukcja użytkownika, kabel przesyłu danych oraz pięć par elektrod treningowych.

### Akcesoria

- Pilot (TRN-ACC-17)
- Kabel przesyłu danych (PAD-ACC-02)
- Kasetka Pad-Pak (TRN-PAK-04)
- Ładowarka (TRN-ACC-14)
- Elektrody: 10 szt. (TRN-ACC-02), 25 szt. (TRN-ACC-03)



## Ratuje życie – po prostu!

### USA / Ameryka Pn./Pd.

HeartSine Technologies, Inc.  
121 Friends Lane, Suite 400  
Newtown, PA. 18940  
darmowy telefon: (866) 478  
7463  
Tel: (215) 860 8100  
Fax: (215) 860 8192  
info@heartsine.com

### Europa / reszta świata

HeartSine Technologies, Inc.  
203 Airport Road West  
Belfast, Northern Ireland BT3 9ED  
Tel: +44 28 9093 9400  
Fax: +44 28 9093 9401  
info@heartsine.co.uk



Produkty opisane w niniejszej broszurze są zgodne z wymogami Europejskiej Dyrektywy Medycznej.

© 2013 HeartSine Technologies, Inc.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. H009-032-216-0



www.heartsine.com