






TrueCPR™

COACHING DEVICE / QUICK REFERENCE CARD

COACHING-GERÄT / KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

DISPOSITIF D'ASSISTANCE / CARTE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

DISPOSITIVO DE ASISTENCIA / TARJETA DE REFERENCIA

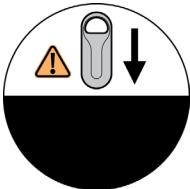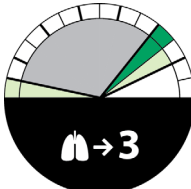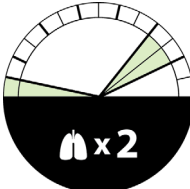 Power button Netztaste Bouton d'alimentation Botón de encendido	 Reposition back pad Neupositionierung der Rückenplatte Corriger la position du module dorsal Aviso para volver a colocar la placa para la espalda
 Mute button Ton-Aus-Taste Bouton Muet Botón de silencio	
 Airway button Atemweg-Taste Bouton Voies aériennes Botón de intubado	
 Low battery indicator Anzeige für niedrigen Batteriestand Indicateur de batterie faible Indicador de batería baja	
 Countdown to ventilations Countdown bis Beatmung Compte à rebours avant ventilation Cuenta atrás para ventilaciones	 Ventilation prompt Aufforderung zur Beatmung Invite de ventilation Aviso de ventilación

If the device cannot be positioned correctly on the patient or fails to operate, remove the device and perform CPR unaided.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß auf dem Patienten positioniert werden kann oder wenn das Gerät nicht funktioniert, entfernen Sie es und führen Sie die HLW ohne das Gerät durch.

S'il est impossible de placer correctement l'appareil sur le patient ou si l'appareil ne fonctionne pas, retirer l'appareil et pratiquer une RCP sans l'appareil.


Si el dispositivo no se puede colocar correctamente sobre el paciente o funciona incorrectamente, retire el dispositivo y aplique RCP sin ayuda.

See the *Instructions for Use* for complete operating instructions.


Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie in der *Gebrauchsanweisung*.

Pour des instructions complètes, consulter les *Instructions d'utilisation*.


Consulte las instrucciones de funcionamiento en las *Instrucciones de uso*.

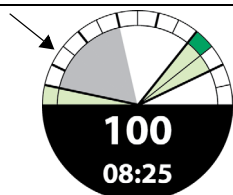

Compression in process
Kompression wird ausgeführt
Compression en cours
Compresión en curso

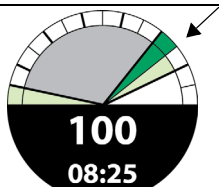

Sufficient depth
Ausreichende Tiefe
Profondeur suffisante
Profundidad suficiente

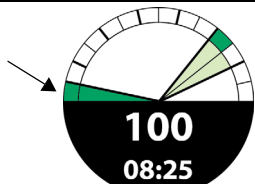


Sufficient recoil
Ausreichende Entlastung
Relâchement suffisant
Retracción suficiente



Compression too shallow
Kompression zu gering
Compression superficielle
Compresión excesivamente superficial




Incomplete recoil
Unvollständige Entlastung
Relâchement incomplet
Retracción incompleto

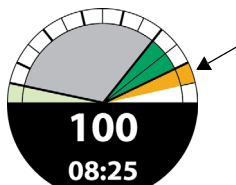

Compression > 6 cm
Kompression > 6 cm
Compression > 6 cm
Compresión > 6 cm



Review 1: Press Power + Airway
Überprüfung 1: Netztauste + Atemweg-
Taste drücken
Examen 1 : Appuyer sur Alimentation +
Voies aériennes
Revisión 1: Pulse los botones
de encendido + intubado

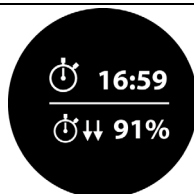

Review 2: Press Mute
Überprüfung 2: Ton-Aus-Taste drücken
Examen 2 : Appuyer sur Muet
Revisión 2: Pulse el botón de silencio